

неноTM

sinus

ANVÄNDARMANUAL



Bästa kund,
produkten Evorei Sinus som du köpt är ett elektriskt nässug avsett för att avlägsna sekret från barnets näsa. Anordningen är avsedd för spädbarn och barn som är över ett år.
Vänligen läs igenom den medföljande bruksanvisningen innan du börjar använda anordningen.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Produkten är ingen leksak - låt inte barnen leka med den.
2. Testa sugkraften på en vuxen persons handrygg innan användning.
3. Använd den medföljande USB-sladden för att se till att laddningsspänningen överensstämmer med anordningens parametrar.
4. Ladda inte anordningen medan den används.
5. Om anordningen inte ska användas under en längre tid (minst 3 månader) får akumulatören laddas fullt först.
6. Plocka inte isär och reparera inte anordningen på egen hand. Kontakta service vid eventuella fel.

2. PRODUKTENS EGENSKAPER

- 1. Bytbara silikon toppar**
Uppsättningen innehåller fyra typer av toppar som gör att du kan anpassa anordningen till barnets ålder och behov.
- 2. Tre sugintensitetsgrader**
Låg, medelhög och hög sugintensitet du kan byta mellan för att anpassa anordningens funktion till barnets behov.
- 3. Inbyggd timer**
Anordningen stängs av automatiskt efter tre minuters användning så att batteriet inte laddas ur.
- 4. Säker utformning**
Då anordningen är placerad vid 90 graders vinkel är den säker att använda och kan inte tryckas in för djupt i barnets näsa.
- 5. Belysning**
En extra LED-lampa på anordningen som slås på separat gör att nässuget även kan användas på natten. Lampans varma ljus irriterar inte barnets ögon eller hud och gör det lättare att se näsans insida.
- 6. Lätt att rengöra och vattentätt**
Nässuget har vattentäthetsklass IPX6 och kan därför tvättas under rinnande vatten. Får inte sänkas i vatten. Du kan ta ut topparna och sekretbehållaren ur anordningen för att noggrannare rengöra nässuget från kvarblivande föroreningar.
- 7. Lätt och flyttbart**
Med sitt bekväma handtag och stora knappar är anordningen lätt och enkel att använda. Anordningen är mobil då den har en inbyggd ackumulator.
- 8. Ackumulator med hög kapacitet**
Anordningen har en inbyggd litiumackumulator med 400mAh kapacitet som kan laddas via en micro USB-port.

3. BESKRIVNING AV ANORDNINGEN




4. DELAR AV UPPSÄTTNINGEN

1. Koppformad silikon topp (platt)
2. Koppformad silikon topp (sned)
3. Trattformad silikon topp (platt)
4. Trattformad silikon topp (sned)
5. Sekretbehållare
6. Lock som förhindrar att sekretet läcker tillbaka från behållaren
7. Behållarens yttre lock
8. USB-sladd (för laddning)

5. INSTALLATION

1. Lyft på locket som förhindrar att sekretet läcker tillbaka
 2. Placera behållaren med lock på anordningens fördjupning
 3. Placera behållarens yttre lock på anordningen, tryck fast det genom att vrida det medurs för att säkerställa anordningen fungerar korrekt.
 4. Välj en lämplig silikon topp och placera den på behållarens yttre lock.
- Se till att alla element vid installation placeras i rätt ordning i anordningen och att det yttre locket vrids fast medurs. Medan du plockar ihop anordningen ska du kontrollera att tätningarna är rätt placerade på behållaren och anordningens hölje. Om någon av tätningarna inte är rätt placerad, kommer detta att påverka sugfunktionen.

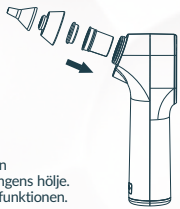

6. SILIKONTOPPAR

- 1. Koppformade toppar (platt, sned)**
Används för att rensa näsan hos spädbarn. De kortare topparna lämpar sig bättre för näsan hos nyfödda barn, toppens koppformade del blockerar näsborren, vilket underlättar bortsugning av sekret. Den sneda toppen kan användas för att rensa näsborrarnas väggar och suger lättare ut sekret som ligger fast inuti näsan.
- 2. Trattformade toppar (platt, sned)**
Används för att rensa näsan hos barn som är över 1 år gamla. Den trattformade toppen tränger djupare in i näsan och är därför bättre lämpad för barn som är lite större. Den sneda toppen kan användas för att rensa näsborrarnas väggar och suger lättare ut sekret som ligger fast inuti näsan.

7. BRUKSANVISNING

1. Plocka ihop anordningen enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Se till att det finns en tätning placerad på nässugets hölje samt rätt silikon topp på behållarens yttre hölje. Välj den sugintensitet som passar den aktuella situationen.
- Speciella fall**
 - a. Är sekretet i barnets näsa torrt får du mjuka upp den med fysiologisk koksaltlösning med hjälp av det elektriska nässuget.
 - b. Efter att sekretet mjukats upp kan du avlägsna det direkt med nässuget.
 - c. Om du inte ser något sekret men barnet ger ifrån sig väsende ljud vid andning innebär det att näsan är täppt. Det rekommenderas att du stimulerar näsan lätt så att barnet nyser och du sedan kan suga ut sekretet med nässuget.
- 2. Rekommenderad användning**
Innan du använder nässuget på barnet får du testa dess kraft på handryggen och anpassa sugintensiteten enligt vad du anser är lämpligast.
! Ladda anordningen i två timmar innan du använder den för första gången så att akumulatören får en längre livslängd.
Strömförsörjningsknapp:
1 tryck - låg sugintensitet
2 tryck - medelhög sugintensitet
3 tryck - hög sugintensitet
Om du trycker strömförsörjningsknappen vid hög sugintensitet, stängs anordningen av.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV ANORDNINGEN

1. Toppar och sekretbehållare kan tas ut ur anordningen och tvättas separat. De kan även sköljas under rinnande vatten med en borste.
2. Du kan använda en bomullstopps med alkohol för medicinskt bruk för att rengöra luftutsläppet.
3. Se till att alla element är torra innan anordningen plockas ihop så att det inte samlas några bakterier.
4. Använd inte slipmedel eller frätande rengöringsmedel vid rengöring av anordningen. Detta kan påverka livslängden negativt.
5. Kontrollera innan varje användning att anordningen har rengjorts på rätt sätt och att ingen del är våt för att förhindra att det samlas bakterier och anordningens sugkraft försvagas.
6. Stäng av anordningen vid rengöring.
7. Doppa inte anordningen i vatten.

9. SPECIFIKATION

Utgående spänning:	5V
Arbetsspänning:	3.7V
Effekt:	2.2W
Akkumulator:	Litium, 400mAh
Vattentäthet:	IPX6
Vikt:	153g
Mått:	154x32x70mm (utan silikon topp)

10. GARANTIKORT

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.
Warunki gwarancji można znaleźć na stronie: <https://nenopl/gwarancja>
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: <https://nenopl/kontakt>

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Kraków
Polska
Wyprodukowano w P.R.C.



нено[®]
www.nenopl
inspired by Children,
designed by Parents