

# prolife

**NO**

## BRUKSANVISNING ELEKTRONISK TERMOMETER

MODELL: PROLIFE PDT 500 INTELLIGENT (AET-F344)\*



Les denne bruksanvisningen før bruk.

Takk for at du valgte ProLife! Vi er glade for å være en del av din helseomsorg og er sikre på at vårt termometer vil være din pålitelige følgesvenn i mange år fremover. ProLife PDT500 Intelligent Termometer er et moderne, innovativt apparat som gjør temperaturmåling rask, nøyaktig og sikker. Det er designet med tanke på brukerkomfort og tilbyr to driftsmoduser:

- Hurtigmodus (Prediktiv) – gir resultater på bare 15 sekunder takket være intelligente algoritmer, ideelt for akutte situasjoner. Denne modusen anbefales ikke for temperaturmåling hos barn under 3 år.
- Klinisk målemodus – for grundige kontroller og maksimal nøyaktighet på omtrent 5 minutter, når detaljert overvåking er nødvendig.

Begge modusene sikrer komfort og nøyaktighet, og oppfyller internasjonale kvalitetsstandarder. Temperaturen kan måles i armhulen (aksillær metode). Hvis du har spørsmål angående kroppstemperatur, bør du oppsøke lege.

### INNTRØKKSJON

#### Navn på medisinsk utstyr

Elektronisk termometer ProLife PDT 500 Intelligent (AET-F344)\*.

#### FØR START

Les nøye gjennom vårt elektroniske termometer ProLife PDT 500 Intelligent (heretter

For sikker og riktig bruk av denne enheten må du lese og forstå sikkerhetsforanstaltningene i denne bruksanvisningen.

- Oppbevar denne håndboken for enkel referanse.
- Oppbevar denne håndboken på en forsvarlig måte og unngå å den går tapt.
- Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst kontakt produsenten.

### TILTENKT BRUK / INDIKASJONER FOR BRUK

Termometeret er beregnet på å måle kroppstemperaturen hos mennesker i armhulen. Ved måling andre steder enn i armhulen vil hurtigmålingsmodusen ikke fungere korrekt. Enheten kan brukes gjentatte ganger til klinisk bruk eller hjemmebruk på personer i alle aldre. Kontraindikasjoner: Ikke til bruk i inkubatorer. Tiltalte brukere: Utdannede og kvalifiserte fagpersoner og legfolk. Tiltalt bruksmiljø: Klinikk og hjemme.

### KORT BRUKSANVISNING


#### ▲ Oppmerksomhet:

Før bruk må du sette inn batteriene (2\*AAA-batterier) i ladeboksen.

- Trykk på den brede enden av termometeret og ta det ut av ladeboksen. Termometeret vil vibrere og slå seg automatisk på, og vise temperaturen fra den siste målingen.
- Når termometeret viser « — — », betyr det at den går tapt inn i målemodus. Plasser termometeret i armhulen som vist på bildet for å måle temperaturen.
- Når termometeret vibrerer (etter 15 sekunder), er hurtigmålingen fullført. Hvis du er fornyad med resultatet av hurtigmålingen, fjerner du termometeret og leser av resultatet.
- Hvis du fortsetter å holde termometeret etter den første vibrasjonen, vil det automatisk bytte til klinisk målemodus. Når termometeret fastsår at kroppstemperaturen er stabil (ca. 5 minutter), er den kliniske målingen fullført. Stabilitetskriteriet er – termisk likevekt <0,1 °C/16 sek. Når enheten vibrerer igjen, fjerner du termometeret for å lese av temperaturverdien.
- Etter målingen plasserer du termometeret i ladeboksen. Termometeret slås av og går inn i lademodus, og batterisymbolet blinker sakte.

### BESKRIVELSE AV ENHETEN

- Skjerm.
- Enhetshode.
- Sonde.
- Ladeport.
- Pogo-pinne.
- Ladeboksdeksel.
- Batterideksel.

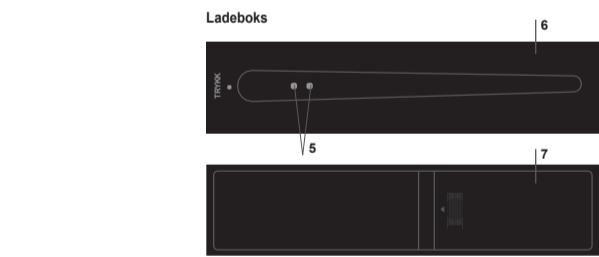

### VISNING



**Symbol for hurtig (prediktiv) modus:** indikerer at enheten er i hurtigmålingsmodus (prediktiv).

**Minne-symbol:** viser at enheten for øyeblikket er i minnesk-modus.

**Batterisymbol:** når batterinivået er lavt, vil symbolet minne deg om å lade eller bytte batterier i ladeboksen.

**Temperaturrenhet:** viser temperaturrenheten.

**Temperaturverdi:** viser temperaturverdien når mennesk eller måling er fullført.

### KORREKT MÅLESTILLING


Plasser termometerproben midt i armhulen, sørg for at den berører huden, skyv den litt opp og klem den fast med armen; hold armen tett inntil tilknet i 5 minutter før og under målingen for å sikre at termometerproben er helt dekket og ikke påvirkes av luft.

**▲ Merk:** Tørk av svetten under armhulen før du måler temperaturen.

### BRUKSANVISNING

- Ta termometeret ut av ladeboksen, og termometeret slås på automatisk etter vibrasjon. Start målemodus når « — — » vises på skjermen.

**▲ Oppmerksomhet:** Vennligst sett batteriene (2\*AAA-batterier) i ladeboksen før bruk.

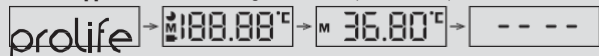

- Velg av målemodus.
  - Hurtig (forutligbar) modus: Plasser termometerproben under armhulen for måling, og målingen vil være fullført på ca. 15 sekunder. Termometeret vil vibrere og vise måleresultatet. På dette tidspunktet kan du lese av temperaturverdien, som vist nedenfor:
- Modus for klinisk måling (faktisk måling): Ikke fjern termometeret når hurtigmålingen er fullført. Etter ca. 15 sekunder går det over i klinisk målemodus for å fortsette målingen, og den kliniske målingen vil være fullført på ca. 5 minutter. Termometeret vil vibrere og vise måleresultatet. Du kan da lese av temperaturverdien.



Vær oppmerksom på at etter at du har byttet til klinisk målemodus, vil temperaturverdien målt i hurtigmålemodus fortsatt vises på displayet i ca. 1 minutt.

Temperaturverdi	Skjerm	Melding / Vibrasjoner
T < 32,00 <span> </span> °C	Lo <span> </span> °C	Tre ganger to påfølgende vibrasjoner:}}}}
32,00 <span> </span> °C ≤ T < 37,50 <span> </span> °C	Måledata	Tre ganger to påfølgende vibrasjoner:}}}}
37,50 <span> </span> °C ≤ T ≤ 43,00 <span> </span> °C	Forhøyet temperatur Temperaturrenheten er oransje	Tre ganger fire påfølgende vibrasjoner:}}}}}}}}}}}}
T > 43,00 <span> </span> °C	Hi <span> </span> °C	Tre ganger to påfølgende vibrasjoner:}}}}

- Utenfor ladeboksen slås termometeret automatisk av innen ca. 3 minutter. Plasser termometeret i ladeboksen for å bytte til lademodus.

#### ▲ Merk:

- Hvis forskjellen mellom hurtigmålingsmodus og klinisk målemodus etter gjentatte målinger er mer enn 0,5 °C, anbefaler vi at du sjekker termometeret til et servicesenter.

- Hvis du trenger den mest nøyaktige målingen av kroppstemperaturen, vennligst bruk den kliniske målemodusen.
- Hvis du må måle igjen, må du vente ett minutt.


#### ▲ Merk

- Brukere og termometer bør oppholde seg i et rom med stabil forfuktighet i minst 30 minutter. Ikke ta en måling mens eller umiddelbart etter amning av en baby.
- Pasienter bør ikke drikke, spise eller trene før/mens målingen utføres.
- Ikke fjern termometerproben fra måleområdet før du mottar et signal som indikerer at målingen er avsluttet (vibrasjon).
- Bruk en alkoholfriervekt til å rengjøre sensoren forsiktig, og vent i 15 minutter før du tar en måling på en annen bruker.
- Ta alltid temperaturen på samme sted, siden temperaturmålingene kan variere avhengig av sted.
- I følgende situasjoner anbefales det å ta tre temperaturmålinger og bruke den høyeste som måleresultat:
  - Barn under tre år med nedsatt immunforsvar, og for hvem tilstedeværelsen eller fraværet av feber er avgjørende.
  - Når brukeren lærer å bruke termometeret for første gang, inntil han/hun har blitt kjent med instrumentet og oppnår konsistente målinger.
  - Hvis målingen er uoverskende lav.
- Målinger fra forskjellige måleplasser bør ikke sammenlignes, da normal kroppstemperatur varierer avhengig av måleplass og tidspunkt på dagen, og er høyest om kvelden og lavest omtrent en time før man våkner.

### HUKOMMELSESEKROD

Etter at målingen er fullført, slår du av enheten. Den siste målte verdien vises neste gang den slås på.

### TILGANG TIL TERMOMETERET

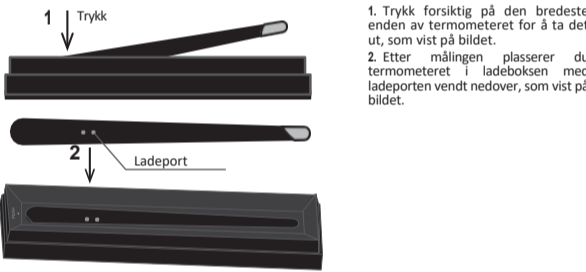


### LADEMODUS

Ta termometeret ut av ladeboksen. Hvis « » vises på skjermen, eller hvis det ikke vises noe, og det heller ikke vises noe etter at du har ristet i termometeret, må du legge det tilbake i ladeboksen for å lade det.



Legg termometeret i ladeboksen for å lade det. « » vises på skjermen og blinker til den er fulladet (ingen visning på skjermen når den er fulladet).

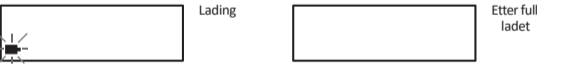


#### ▲ Merk:

- Når du bruker termometeret for første gang, må du sørge for at batteriet har gjennomgått minst to komplette oppladningscykluser. En komplett oppladningscyklus er: uavbrutt lading, og deretter utlading til termometeret går tom for strøm og slås av. Batteriene bør optimaliseres regelmessig under bruk for å opprettholde levetiden. Det anbefales å optimalisere batteriet hver annen måned ved bruk eller lagring, eller når batteriet holder betydelig kortere.
- Batteriets levetid avhenger av bruksfrekvens og brukstid.
- Under ekstreme forhold kan batteriet i ladeboksen lekke etsende væske. Hvis dette kommer i kontakt med dyrene eller huden, skyll umiddelbart med vann og oppsøk lege.

### BYTT BATTERIET I LADEBOKSEN

Når termometeret settes inn i ladeboksen, og « »-lampen lyser oransje eller det ikke vises noe på skjermen, må du bytte batteriet i ladeboksen. Følg disse trinnene:

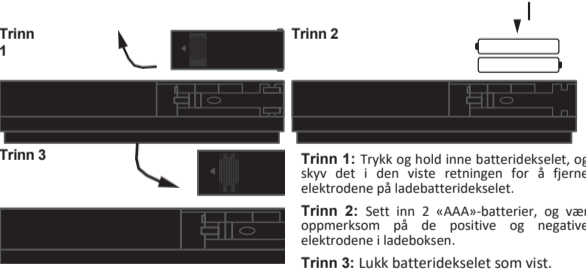

FELLMÅLINGER	Løsning
Ingen respons (kan ikke slås på)	Lad termometeret, eller bytt batteriene i ladeboksen
Visning under bruk	Lavt batterinivå, vennligst lad termometeret
Lyset er oransje	Lavt batterinivå, vennligst bytt batterier i ladeboksen
Høy °C	Måletemperaturen er høyere enn 43,00 <span> </span> °C
Lav °C	Måletemperaturen er lavere enn 32,00 <span> </span> °C
Err	Feil på sensoren, kontakt forhandleren
Er °C	Målingen er ikke fullført, vennligst måle på nytt

Vis alltid « <span> </span> — <span> </span> — <span> </span> » når du måler kroppstemperatur	Hvis omgivelsestemperaturen er for høy, kan det føre til at sonden blir varm. Bruk et vått håndkle eller lignende til å kjele ned sonden, og mål deretter kroppstemperaturen
---	--

### VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Enhetsens overflate bør rengjøres umiddelbart etter bruk ved romtemperatur som beskrevet nedenfor:

- Temperatursonde:** For å rengjøre sonden, tørk forsiktig av overflaten med en bomullsdott lett fuktet med 70–80 % medisinsk alkohol i 15 sekunder, og tørk den umiddelbart med en ren bomullsdott. Bør ikke rengjøres med du la den tørke i minst 5 minutter før du tar temperaturmålinger. Sørg for at temperatursonden er ren og tørr. Unngå å berøre sonden, med mindre rengjøring er nødvendig. Ikke ikke termometeret hvis målesonden er skadet. Kontakt et spesialisert servicesenter eller forhandleren for reparasjon og vedlikehold.
- Termometer og ladeboks:** Bruk en myk klut lett fuktet med 70–80 % medisinsk alkohol til å rengjøre termometeret eller ladeboksens skjerm og utsiden i 20 sekunder, og tørk umiddelbart med en ren, myk klut i 20 sekunder. Etter rengjøring må du la det tørke i minst 5 minutter før du tar temperaturen. Sørg for at skjermen og utsiden er ren og tørr. Ikke bruk termometeret hvis det eller ladeboksen er skadet. For reparasjon og vedlikehold, kontakt et spesialisert servicesenter eller forhandleren.

### Desinfeksjon

Etter bruk av enheten i et miljø med risiko for forurensning, må overflaten desinfiseres umiddelbart som følger:

- Temperaturføler:** For å desinfisere sonden skal du forsiktig tørke av overflaten med en bomullsdott som er lett fuktet med 70–80 % medisinsk alkohol i 20 sekunder, og deretter tørke den umiddelbart med en ren bomullsdott i 25 sekunder. Etter desinfisering må du la sonden tørke i minst 5 minutter før du tar temperaturen. Sørg for at temperatursonden er ren og tørr. Unngå å berøre sonden, med mindre rengjøring er nødvendig. Ikke bruk termometeret hvis målesonden er skadet. Kontakt et spesialisert servicesenter eller forhandleren for reparasjon og vedlikehold.
- Termometer og ladeboks:** Bruk en myk klut lett fuktet med 70–80 % medisinsk alkohol til å desinfisere termometeret eller ladeboksens display og utsiden i 30 sekunder, og tørk umiddelbart med en ren, myk klut i 35 sekunder. Etter desinfisering må du la det tørke i minst 5 minutter før du tar i bruk, slik at displayet og utsiden er rene og tørre. Ikke bruk termometeret hvis det eller ladeboksen er skadet. Kontakt et spesialisert servicesenter eller forhandleren for reparasjon og vedlikehold.
- Kontroller enhetsens overflate for å sikre at den er synlig ren.

#### ▲ Merknader:

- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller desinfeksjonsmidler.
  - Enheten kan ikke rengjøres og vedlikeholdes under bruk.
  - Hvis den brukes til flere pasienter, må du utføre nødvendig rengjøring og desinfeksjon, og trinn 1) til 2) må gjentas.
  - Siden forskjellige pasienter bruker den, må den rengjøres før eller etter hver bruk.
  - Ikke bruk metoder som ikke er anbefalt for rengjøring og desinfeksjon.
  - Termometeret er vannrett, med en vanntethetsgrad på IP65, men ladeboksen er ikke vannrett. Ikke la den falle i vann eller andre væsker.
  - Hvis målesonden eller termometeret er skadet, må du kontakte et spesialisert servicesenter eller forhandleren for reparasjon og vedlikehold.
  - Hvis ladeboksen er skadet eller tapt, må du kontakte et spesialisert servicesenter eller forhandleren.
- Oppbevaring**
- Oppbevar termometeret ved en temperatur mellom -20 og 55 °C, og sørg for at den relative luftfuktigheten er mellom 15 og 93 % RH. Atmosfærisk trykk: 70–106 kPa.
  - Ikke la termometeret være utsatt for eller i fare for direkte sollys, høy temperatur, fuktighet, støv, flammer, vibrasjoner eller støt.
  - Ta ut batteriet hvis det ikke skal brukes på lenge.
  - Oppbevar alltid termometeret utliggerelig for barn.

### Kalibrering

Denne enheten er kalibrert ved produksjon. Hvis den brukes i henhold til bruksanvisningen, er det ikke nødvendig med periodisk kalibrering. Hvis du på noe tidspunkt er i tvil om målenøyaktigheten, kan du kontakte vår servicerepresentant for å få hjelp. Inspeksjonsdatoen er angitt med et etikettnummer på enheten. Termometeret er innledningsvis kalibrert ved produksjon.

Vi anbefaler at enheten testes for nøyaktighet hvert annet år eller etter mekanisk støt (f.eks. hvis den har falt ned). Ta kontakt med et spesialisert servicesenter eller forhandleren for å avtale en test.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Enhetsnavn	Elektronisk termometer
Modell	ProLife PDT 500 Intelligent (AET-F344)
Målemodus	Aksillær modus To moduser: justert og direkte. Den justerte modusen er en rask (prediktiv) måling, mens den direkte modusen er en klinisk (faktisk) måling.
Måleenheter	Celsius (°C)
Driftsforhold	+5 <span> </span> °C – +40 <span> </span> °C, 15 <span> </span> % RF – 80 <span> </span> % RF, 70 – 106 kPa
Oppbevaringsbetingels er	-20 <span> </span> °C – +55 <span> </span> °C, 15 <span> </span> % RF – 93 <span> </span> % RF, 70 – 106 kPa
Målested	Aksillær
Referansepunkt	Aksillær 32,00 – 43,00 <span> </span> °C
Nøyaktighet (laboratorium)	±0,10 <span> </span> °C
Stabilitetskriterier (for klinisk modus)	Termisk likevekt <0,1 <span> </span> °C/16 sek
Nøyaktighet for klinisk test (klinisk skjevhet, avtalsgrenser, klinisk reputerbarhet)	±0,30 <span> </span> °C
Oppløsning på display	0,01 <span> </span> °C
Henting av lagring	≥37,50 <span> </span> °C
Varsel ved høy temperatur	≥37,50 <span> </span> °C
Dimensjoner (termometer)	134 x 11 x 7 mm (±1,0 mm)
Dimensjoner (ladeboks)	157 x 37 x 20 mm (±1,0 mm)
Vekt (termometer)	6,0 g (±0,5 g)
Vekt (ladeboks)	52 g (uten batterier) (±1,0 g)
Batteri (termometer)	DC 3,7 V Li-ion-batteri, 20 mAh
Batteri (ladeboks)	DC 3 V, 2 x AAA-batterier
Slår seg automatisk av	Ingen aktivitet i løpet av 3 minutter
Levetid	5 år
Transient responstid	<60 s (fra lav til høy temperatur), gjelder ikke fra høy til lav temperatur

### PRODUKTINFORMASJON

Programvareversjon: A.01.

Standard: Produktet er produsert i henhold til ISO80601-2-56.

### KLASSIFISERING

- Internett drevet utstyr;
- Type BF-berøringsdel;
- IP-klassifisering: IP65 (termometerhus), IP21 (ladeboks);
- Desinfeksjon med 70–80 % medisinsk alkohol;
- Ikke kategori AP APG-utstyr;
- Driftsmodus: kontinuerlig drift.

### GARANTI

Garantiperioden er angitt i garantiserifikatet. Garantiperioden gjelder fra salgsdatoen, forutsatt at alle driftsbetingelser som er angitt i denne bruksanvisningen overholdes nøye.

Garantien er gyldig forutsatt at det foreligger et garantikort utført av en autorisert representant som bekrefter selgsdatoen, samt den relevante kvitteringen.

Garanti og gratis vedlikeholdstjeneste ytes ikke i følgende tilfeller:

- bruk av enheten i strid med bruksanvisningen;
- skade forårsaket av forsettlig eller feilaktige handlinger fra forbrukerens side;
- tegn på mekanisk påvirkning, bulker, sprekker, fiks osv. på termometerhuset, tegn på at enheten har blitt åpnet, demontert, reparert uten autorisasjon, fuktinntrengning, eksponering for aggressive stoffer eller andre uautoriserte endringer av enheten, samt i andre tilfeller av brudd på reglene for oppbevaring, rengjøring, transport og bruk som er angitt i bruksanvisningen.

#### ▲ Advarsel

Følg instruksjonene nøye for å sikre pålitelig og langvarig drift av enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, vennligst kontakt forhandleren. For reparasjon og vedlikehold, vennligst kontakt et spesialisert servicesenter.

Bruksanvisning – 1 stk. AAA-batteri – 2 stk. (valgfrfritt)\*

### SIKKERHETSTILTAK

Advarselmerker og symboler er inkludert for sikker og riktig bruk av dette produktet og for å forhindre skade på deg selv og andret.

Se tabellen nedenfor for beskrivelse av advarselmerker og symboler

<b>▲ Advarsel</b>	Betyr at det er fare for personskade ved feil bruk
<b>▲ Merk</b>	Betyr at det er fare for personskade eller skade på eiendom ved feil bruk

**[Materiell skade omfatter enhver skade på hus, familieeiendom, husdyr og kjøledyr]**

### Forklaring av merker eller symboler

Følgende symboler kan forekomme i bruksanvisningen, på det elektroniske termometeret og tilbehøret.

FORBUD	MÅ OVERHOLDES
Betyr forbudt, med detaljerte elementer uttrykt i ord eller tall innenfor eller ved siden av merket. Venstre betyr generell forbudt	Betyr obligatorisk, med detaljerte elementer uttrykt i ord eller tall innenfor eller ved siden av merket. Det til venstre betyr generell obligatorisk
Følg bruksanvisningen	<b>BETYDNING AV SYMBOL</b> Del av type BF
Forsiktig: Se vedlagte dokumenter	Ikke rull
Angir riktig oppreist stilling for transportemballasjen	Transportemballasjen må ikke utsettes for sollys
Produsent	Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling
Innholdet i transportemballasjen er skjørt og må derfor håndteres med forsiktighet	Produksjonsdato
Partinummer	Enheten skal ikke brukes etter utløpet av den angitte eller dagen
Medisinsk utstyr	IP21
Angir temperaturgrensener innenfor hvilke transportemballasjen skal oppbevares og håndteres	IP65
CE-merke: indikerer at enheten er i samsvar EU 2017/745	Autorisert representant i Det europeiske fellesskap
UDI-mal	Transportemballasjen skal holdes tørr

#### AVFALL

Ikke kast elektriske apparater som usortert husholdningsavfall, bruk separate innsamlingsanlegg. Kontakt din lokale myndighet for informasjon om tilgjengelige innsamlingsssystemer. Hvis elektriske apparater kastes på fyllinger eller søppeifyllinger, kan farlige stoffer lekkte ut i grunnvannet og komme inn i næringskjeden, noe som kan skade helsen og velværet ditt.

#### ▲ Advarsel

Ikke bruk termometeret under ekstreme temperaturer (under 5 °C eller over 40 °C) eller ekstrem fuktighet (under 15 % RF eller over 80 % RF).  
\* Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til unøyaktighet

Ikke utsett termometeret for ekstreme temperaturer (under -20 °C eller over 55 °C) eller ekstrem fuktighet (under 15 % RF eller over 93 % RF).  
\* Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til unøyaktighet

Temperaturføleren har fått et støt og er løst.  
\* Kontakt forhandleren umiddelbart

Ikke modifier denne enheten uten tillatelse fra produsenten.  
\* Kontakt forhandleren umiddelbart

Enheten kan ikke repareres og inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.  
\* Hvis det oppstår problemer, kontakt forhandleren umiddelbart

Enheten krever ingen kalibrering.  
\* Hvis det oppstår problemer, må du umiddelbart kontakte forhandleren

Det er farlig for pasienter å utføre en selvurdering og selvbehandling basert på måleresultatene. Sørg for å følge legens instruksjoner.

\* En selvurdering kan føre til forverring av sykdommer

Rengjør en tilsmusset temperaturføler forsiktig med en myk, tørr klut.  
\* Rengjøring med toalettpapir eller papirhåndkle kan ripe temperaturføleren og forringe utsendte

Sett batteriet på plass i riktig posisjon i henhold til bruksanvisningen.  
\* Føll utskifting vil føre til at batteriet blir varmt

Ikke senk termometeret ned i væske.  
\* Denne enheten er ikke vannrett

Personer med implanterbare medisinske enheter, for eksempel pacemakere, bør ikke bruke dette elektroniske termometeret, da den innebygede magneten kan forårsake funksjonsfeil

Operatøren skal ikke berøre termometeret og pasienten samtidig

Brukeren må kontrollere at utstyret fungerer sikkert og sørgre for at det er i god stand før det tas i bruk

Ikke bruk mobiltelefon i nærheten når termometeret er i bruk.

\* Barbert og mobil RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke MEDISINSK ELEKTRISK UTSTYR. Unnløtelse av å gjøre dette kan føre til unøyaktighet

Oppbevar enheten utliggerelig for barn.  
\* Ved utilskilt sveivling av batteri eller beskyttelsesfilm, kontakt lege umiddelbart

Oppbevarings- og driftsforhold beskrevet i avsnittet Tekniske spesifikasjoner.

- Sørg for at barn ikke bruker instrumentet uten tilsyn; noen deler er små nok til å bli svelget og forårsake kvelning.
- Beskytt den mot:
  - ekstreme temperaturer;
  - støt og fall;
  - forurensning og støv;

\* I bruksanvisningen brukes det forkortede navnet på enheten: Elektronisk termometer Prolife PDT 500 Intelligent.

Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, 518118 Shenzhen, Guangdong, Kina. Utviklet for Montex Swiss AG, Sveits

**Autorisert representant i EU:** CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo nr. 18, CP 29006, Malaga, Spania.



\*Komponenter merket med symbolet «\*\*» er kanskje ikke inkludert i det komplette settet/pakken.

IM-PDT500-EN-V01 Utgivelsesdato: 09.09.2024

