

nenorTM

due

BRUKERMANUAL



Kjære kunde,

Neno Due-enheten du har kjøpt er en elektronisk brystpumpe ment for pumping
Oav morsmelk etter fødsel.

Les bruksanvisningen før du bruker enheten.

1. FORHOLDSREGLER

1. Ikke bruk brystpumpen under graviditet – det kan føre til for tidlig fødsel.
2. Ikke bruk enheten hvis du har kroniske sykdommer eller overfølsomhet, som kan føre til at bruk av brystpumpen ville gi deg vondt.
3. Forsikre deg om at ingen av elementene er skadet før hver bruk av enheten. Ikke bruk brystpumpen hvis noen av elementene er synlig skadet.
4. Hold enheten utilgjengelig for barn og kjæledyr.
5. Av hygieniske grunner bør brystpumpen ukes av bare én person.
6. Hold enhetens pumpedel borte fra vann.
7. Unngå utsettelse av enheten for mekaniske skader, for eksempel fall.
8. Hold brystpumpens silikonelementer borte fra varme overflater for å unngå forvrengning.
9. Hver gang du har tenkt å oppbevare melken du har suget ut, må du først rengjøre og desinfisere brystpumpen.
10. Ikke rengjør enhetslementer med slipende midler.
11. Ikke prøv å reparere brystpumpen selv – du vil miste garantien.
12. Hvis bruken av enheten forårsaker smerte eller alvorlig ubehag, må du slå den av og ta den bort fra brystet.
13. Røret krever ikke hyppig vask. Forsikre deg om at røret er tørt før hver bruk. Blir røret våt, kan det skade enheten.
14. Ikke koble laderen til en høyere spenning enn oppgitt i spesifikasjonen.

2. FUNKSJONER

1. Smart enhet:

- a. 6 nivåer av stimulering og 9 nivåer av pumping,
- b. 2-fase pumpeteknologi: stimulering og pumping,
- c. 4-modus smartfunksjon: stimulering/ pumping/ automat/ minne.

2. Design som forhindrer tilbakeføring av melken:

Det lukkede melketransportsystemet sørger for at melken ikke strømmer tilbake i pumpesirkulasjonssystemet, som hjelper med å holde melken fersk og forhindre infeksjoner.

3. Delikat silikonbrystskjold:

Fleksibel, delikat brystskjold er komfortabel, reduserer press og hjelper med å massere brystet for å forbedre melkestrømmen.

4. Stille og lett:

Brystpumpen er lydløs og kan brukes diskret hvor som helst. Prosjektet med tanke på mødre på farten som trenger å tømme melken flere ganger om dagen.

5. Enkel å monteres og rengjøres:

Brystpumpen har bare fem elementer for montering og rengjøring, noe som gjør den veldig enkel å bruke.

6. Smart berøringsskjerm:

Digital skjerm med minne om utførte pumpinger og en tidtaker som lar deg enkelt spore enhetens arbeid og betjene den.

7. Batteri med USB-C-port:


Effektivt litium-ionbatteri som bidrar til opptil 2 timers arbeid. Plugg inn strømforsyning med hjelp av en USB-kabel for å lade batteriet.

8. BPA-fri brystpumpe:

Brystpumpen og dens tilbehør er laget av BPA-frie materialer. Brystpumpen er kompatibel med de fleste tilgjengelige babyflasker.

3. ELEMENTER

- A. Løkk x2
- B. Trakt x2
- C. Pakningens løkk x2
- D. Pakning x2
- E. Skjøte x2
- F. Ventil x2
- G. Melkeflaske x2
- H. Flaskebrikke x2
- I. Rør x2
- J. Enhetens ladekabel
- K. Pumpeanordning

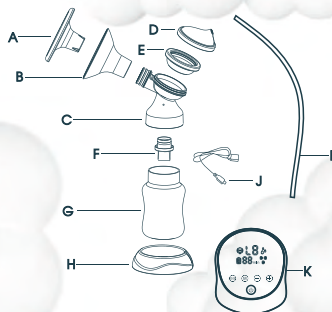

4. BESKRIVELSE AV MODUSER

Matinntaksmodus	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
Sugekraft (kPa)	18,9	21,5	24,5	30,7	33,8	36,9	38,9	40,9	42,9
Prøv stimulering	L1	L2	L3	L4	L5				
Sugekraft (kPa)	3,9	9,7	12,8	17,4	20,5				

5. BESKRIVELSE AV IKONER OG KNAPPER

1. Av/på-knapp:

Hold i 2 sekunder for å slå brystpumpen på eller av.

2. Endre modus:

Trykk på knappen for å endre modus. Det er tre driftsmodi. Enheten vil automatisk gå fra stimuleringsmodus til sugemodus etter 2 minutter. Enheten har en minnefunksjon og en tidtaker. Neste gang du bruker enheten, aktiveres tidligere innstillinger automatisk. Brystpumpen slår seg automatisk av etter 30 minutters bruk.

3. Sugekraft:

+ øker sugekraften; - reduserer sugekraften (stimuleringsmodus: L1–L5; sugemodus: L1–L9).

4. Batteristatus:


Angir strømmengde i batteriet. Lad brystpumpen hvis batteriet er lav.

5. Arbeidstid:

Angir hvor lenge du har brukt brystpumpen. Enheten slås av automatisk etter 30 minutters bruk.

6. Arbeid av en/to brystpumper:

Trykk på knappen for å slå den andre brystpumpen på eller av. På displayet kan du se om en eller to brystpumper er på.

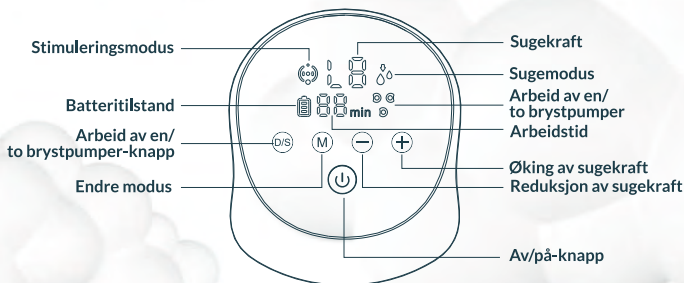

6. FØR FØRSTE BRUK



1. Skru av melkflasken fra kontakten.
2. Trekk ned ventilen for å koble den fra kontakten.
3. Fjern trakthetten og trekk trakten ut av skjøten.
4. Løsne skjøten fra pakningen og pakningsdekselet.

7. RENGJØRING

Vask og desinfisering er to forskjellige aktiviteter. De må gjøres separat for å beskytte babyen din og sørge for at brystpumpen fungerer som den skal.

Vask – det å vaske enhetens overflater og fjerne urenheter.

Desinfisering – det å drepe organismer som bakterier eller virus som kan være til stede på enhetens overflate.

	Trakt	Elementer av brystpumpen (skjõt, pakning, pakningsdeksel)	Flaske og spene
Før første gangs bruk	Vask	Vask	Vask
Etter hver bruk	Vask og dekontaminering	Vask og dekontaminering	Vask og dekontaminering
En gang om dagen	Dekontaminering	Dekontaminering	Dekontaminering

8. MONTERING AV BRYSTPUMPE

1. Vask hendene grundig med såpe og vann før du berører brystpumpen og brystet.
2. Fest pakningen og pakningslokket til skjøten.
3. Sett trakten på skjøten.
4. Plasser ventilen på skjøten og skru melkflasken på skjøten ved å vri den med klokken til den stopper.
5. Koble røret til pakningslokket.
6. Koble røret til riktig inngang på pumpeanordningen.

Enkelt utflod



Dobbel utflod



Råd:

1. Sjekk før hver bruk om delene av brystpumpen ikke er skadet. Erstatt ødelagte deler med nye om nødvendig.
2. Kontroller alltid at elementene er rene før du bruker enheten.
3. For å unngå skader av brystpumpen, må du sørge for at alle elementene er tørre før bruk.

9. LADING AV BRYSTPUMPEN

Før første gangs bruk må du lade brystpumpen i 2 timer ved å koble den til strømforsyning med bruk av en USB-kabel. Batteriikonet på skjermen vil være fullt når ladingen er fullført.

10. BRUK AV BRYSTPUMPEN



1. Plasser trakten på brystet med brystvorten inne i dreneringskanalen.
2. Trykk trakten og brystpumpeskjøtet til brystet ditt med tommel og pekefinger. Støtt brystet med hånden.
3. Slå på brystpumpen ved å trykke på av/på-knappen og velg driftsmodus som passer deg.
4. Trykk på av/på-knappen for å slå av brystpumpen etter bruk og legg løkka på trakten for å beskytte enheten mot støv.
 - a. Brystpumpen begynner å arbeide i stimuleringsmodus. Velg sugekraften som passer for deg ved hjelp av +/- knappene.**Stimuleringsmodus** – rask pumping som etterligner babyens naturlige suging av morsmelk og stimulerer melkestrømmen.
 - b. Etter 2 minutter går brystpumpen automatisk i sugemodus. Tilpass sugekraft med +/- knappene for å finne det høyeste sugenivået som er komfortabel for deg. Hvis melken begynner å komme ut av brystet ditt før to minutter passer, trykk på modusendingsknappen for å gå til sugemodus manuelt.**Sugemodus** – langsommere pumping som suger melken fra brystet forsiktig og effektivt.
 - c. I sugemodus øker du sugekraften til du føler det er litt ubehagelig (ikke smertefullt) og reduserer da sugekraften med en grad.

11. FAQ

1. **Enheden starter ikke:** sørg for at brystpumpen er koblet til en fungerende stikkontakt. Hvis brystpumpen ikke har noen strømkilde, skal skjermen ikke slås på og ingen feilmelding skal vises.
2. **Manglende/ dårlig suging:** sørg for at alle elementene av brystpumpen er riktig plassert. Demonter brystpumpen og sørg for at alle elementene er rene og uskadede. Monter brystpumpen igjen i samsvar med instruksjonene i punktet "Montering av brystpumpen".
3. **Mer melk kommer ut fra brystene enn flasken kan holde:** Slå av brystpumpen og koble den fra strømforsyningen. Bruk en fuktig (ikke våt) klut til å tørke av brystpumpe. Når alle enhetens elementer er tørre, kan du montere dem igjen.

12. LANGTIDIG OPPBEVARING

1. Brystpumpen har et innebygd batteri. For å beskytte seg mot skader, går enheten i lagringsmodus etter en lang periode med inaktivitet. For å deaktivere lagringsmodusen, koble enheten til strømforsyning og lad den i 2 timer.
2. **Før du setter brystpumpen bort i lang tid, må du forsikre deg at:**
 - a. Alle elementer av brystpumpen er rene.
 - b. Pumpeanordningen rengjøres.
 - c. Enhetsbatteriet er fulladet.

13. RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Forbered: mild såpe eller rengjøringsvæske, et rent oppvaskhåndkle, drikkevann.
Elementer som skal vaskes eller desinfiseres:

- Trakt,
- Melkeflaske,
- Skjote,
- Ventil,
- Pakningslokk,
- Pakning,
- Traktlokk.

OBS:

- Vask alle elementene som har vært i direkte kontakt med melken separat umiddelbart etter bruk. På denne måten vil du unngå sedimentdannelse og bakterievekst i enheten.
- Bruk bare drikkevann (spring- eller flaskevann) for rengjøring av enheten.
- Ikke bruk små instrumenter som f.eks. børster når du rengjør ventiler. Pass på at du ikke bryter gjennom ventilen.
- Demonter, vask og skyll alle enhetens elementer som har vært i direkte kontakt med melk (unntatt pumpeanordningen).

1. Rengjøring av brystpumpeelementene:



Trinn 1 – Skyll alle elementene som ble demontert fra hverandre (og som har vært i kontakt med brystet og melken) i kaldt vann for å skylle ut melkerester og sediment.

Trinn 2 – Plasser elementene i varmt såpevann i 5 minutter, deretter vask og skyll.

Trinn 3 – La elementene tørke naturlig. Oppbevar tørre elementene av enheten på et kjølig, tørt sted når de ikke er i bruk.

2. Sterilisering av brystpumpeelementene (før første gangs bruk og etter bruk):



Trinn 1 – Fyll gryten med nok vann til å dekke alle elementene av den demonterte enheten. Kok vannet før du setter den demonterte brystpumpen inn.


Trinn 2 – Plasser enhetens elementer i kokende vann i 10 minutter.

Trinn 3 – La elementene tørke naturlig. Oppbevar tørre elementene på et kjølig, tørt sted når de ikke er i bruk.

3. Rengjøring av pumpeanordningen:

Forbered: mild såpe eller rengjøringsmiddel, rent oppvaskhåndkle.

Elementet som skal rengjøres: pumpeanordning.

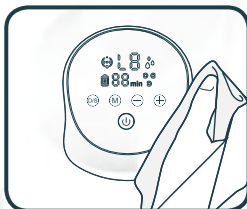

UWAGA:

- Nie zanurzaj urządzenia pompującego pod wodą.
- Nie przepłukuj urządzenia pompującego z użyciem wody.
- Gdy czyścisz wyświetlacz urządzenia pompującego, używaj tylko wilgotnej, miękkiej ściereczki z delikatnym mydłem lub środkiem czyszczącym. Mocniejsze środki czystości lub materiały do ścierania mogą zniszczyć wyświetlacz.

14. SPESIFIKASJON

Utgangseffekt: 110–240V 50–60Hz

Inngangseffekt: 5V 2A

Vekt: 785 g

Størrelse: 105x125x52 mm

Batterikapasitet og -type: 3.7V 2000 mAh Li-Ion

15. GARANTIKORT

Produktet omfattes av 24 måneders garanti.

Garantivilkår finner du på: <https://neno.pl/gwarancja>

Detaljer, kontaktdetaljer og serviceadresse finner du på: <https://neno.pl/kontakt>

Spesifikasjoner og innhold i pakken kan endres uten varsel.

Vi beklager alle ulempene.



Det plasserte symbolet på den overkryssede søppelbøtten indikerer at ubrukt elektrisk eller elektronisk utstyr, dets tilbehør (som strømadaptere, kabler) eller komponenter (for eksempel batterier, hvis inkludert) ikke kan kastes sammen med husholdningsavfall. Passende tiltak når det er nødvendig å kaste enheter eller komponenter (f.eks. Batterier) eller resirkulering av dem, består i å ta enheten til et samlepunkt, der den vil bli akseptert gratis. Avhending er underlagt omarbeidelse av WEEE-direktivet (2012/19/EU) og direktivet om batterier og akkumulatorer (2006/66/EC). Riktig avhending av enheten forhindrer miljøforringelse. Informasjon om innsamlingspunkter for enheter er gitt av relevante lokale myndigheter. Ukorrekt avfallshåndtering er underlagt sanksjoner fastsatt i gjeldende lov i et gitt område.

Produsent:

KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
ul. Ujastek 5b
31-752 Kraków
Polen

Produsert i Kina



neno
www.neno.pl
inspired by Children,
designed by Parents



nenò™

*inspired by Children,
designed by Parents*